

CALCETINES PROTÉSICOS

KCN | KCM | KCW



Los calcetines protésicos ALPS® son ligeros y suaves, y proporcionan amortiguación y comodidad para un ajuste superior.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESTRECHO, MEDIO, ANCHO

1, 3, Y 5 CAPAS


CORTO, EXTRA CORTO, REGULAR, LARGO

TRES ESTILOS

TRES TAMAÑOS

TRES GROSORES

CUATRO LONGITUDES

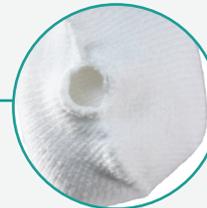

CON ORIFICIO DISTAL (H)



CON ORIFICIO DISTAL REFORZADO (HR)

SIN ORIFICIO DISTAL (N)



EN EVIDENCIA

 Ayudan a manejar los cambios de volumen

 Las fibras técnicas permiten un uso fresco y cómodo

 Mantienen su forma con el tiempo; estiramiento mínimo y no se apelmazan

 **¡AHORA DISPONIBLE EN PAQUETES!**
Una solución completa para los pacientes para controlar la fluctuación del volumen de la extremidad residual. La mayoría de los grosores populares están siempre disponibles



HECHOS DE FIBRAS TÉCNICAS PREMIUM

CREAN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA HUMEDAD QUE MUEVE LA TRANSPIRACIÓN LEJOS DEL CUERPO Y A TRAVÉS DEL TEJIDO, DONDE PUEDE EVAPORAR RÁPIDAMENTE.

CON LOS PAQUETES, SU PACIENTE PUEDE:


- Seleccionar los calcetines necesarios para gestionar la variación del volumen
- Tener calcetines protésicos siempre disponibles cuando otros se estén lavando



making lives better™

ESQUEMA DE MEDIDA

Se recomienda que el calcetín sea aproximadamente 5 cm más largo que el encaje

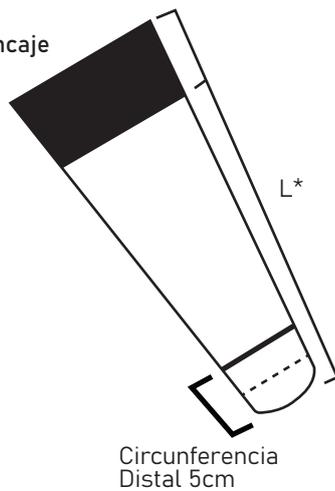

CÓMO MEDIR

Medir la circunferencia a 5 cm del extremo distal

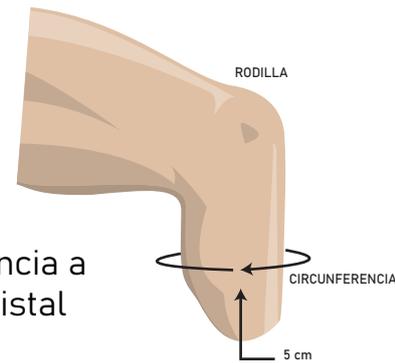


TABLA DE MEDIDAS ENCUENTRE EL AJUSTE PERFECTO

TAMAÑO RECOMENDADO DEL LINER ALPS	NIVEL DE AMPUTACIÓN	CIRCUNFERENCIA PROXIMAL	CIRCUNFERENCIA DISTAL A (5 CM)	*LONGITUD DEL ENCAJE 13-18 CM	*LONGITUD DEL ENCAJE 18-23 CM	*LONGITUD DEL ENCAJE 23-38 CM	*LONGITUD DEL ENCAJE 38-48 CM
20	BK	min. 20-max. 40 cm	20-23 cm	KCN-8-X-Y	KCN-10-X-Y	KCN-14-X-Y	KCN-18-X-Y
24, 26, 28	BK	min. 30-max. 60 cm	23-31 cm	KCM-8-X-Y	KCM-10-X-Y	KCM-14-X-Y	KCM-18-X-Y
32, 38	AK	min. 40-max. 80 cm	31-36 cm	KCW-8-X-Y	KCW-10-X-Y	KCW-14-X-Y	KCW-18-X-Y

X indica el espesor en capas (1 capa = 1,5mm; 3 capas = 2mm; 5 capas = 2,5mm)

Y indica el extremo distal (N-sin orificio; H con orificio; HR con orificio reforzado)

EJEMPLOS:

KCN-08-3-H Calcetín protésico, estrecho, extra corto, 3 capas, con orificio

KCM-10-1-N Calcetín protésico, medio, corto, 1 capa, sin orificio

KCW-18-5-HR Calcetín protésico, ancho, largo, 5 capas, con orificio reforzado



Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň - Czech Republic

