



PDS-Padsil™



Силіконова підкладка
Інструкція з використання



Призначення

Підкладка ALPS Padsil™ призначена для використання протезі. Padsil додає додаткову амортизацію та допомагає зберегти повний контакт у гільзі.

Обмеження та протипоказання

Не надягайте на пошкоджену шкіру або відкриті рани; перед носінням захистіть пошкоджену ділянку відповідним засобом.

Застереження



Висипання та подразнення на шкірі

ALPS Padsil виготовлений з неалергенного силікону.

Якщо при безпосередньому контакті Padsil зі шкірою з'являються висипання або подразнення, припиніть використання і зверніться до сертифікованого протезиста.

Цілісність продукту


Припиніть використання Padsil, якщо на матеріалі з'явилися складки, дірки, пошкодження і зверніться до сертифікованого протезиста.

Як надягати Padsil

У поєднанні з беззамковим лайнером Padsil розміщується на дистальному кінці протезної гільзи (за межами лайнера).

У поєднанні із замковим лайнером, Padsil розміщується всередині лайнера.

Будь ласка, перегляньте зображення нижче для правильного розміщення.

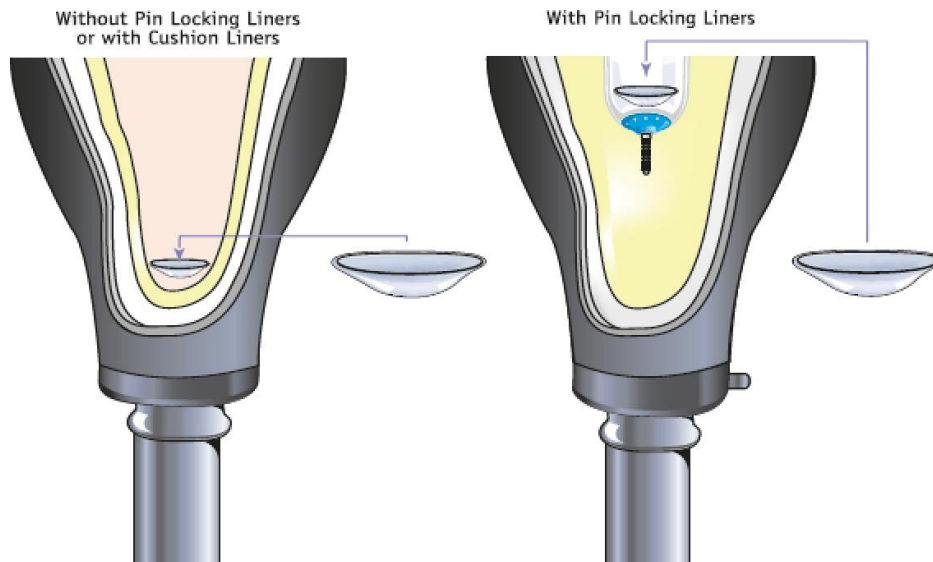

Інструкція по визначенню розмірів

Виміряйте довжину окружності в сантиметрах на 6 см вище від нижньої частини дистального кінця. Це і є вимірний розмір.

Знайдіть вимірний розмір з Мал 1 в наступній таблиці. Знайдіть рекомендований розмір.

Окружність кінцівки (см)	Padsil
14-19 см	S
20-23 см	M
24-27 см	L
28-31 см	XL
32-35 см	XXL

Як очищувати Padsil

Вимийте padsil вручну м'яким милом, наприклад, Очищувальним засобом Alps (PD 595). Перед наступним використанням дайте їм висохнути. Не використовуйте антибактеріальне або дезодоруюче мило, оскільки це може пошкодити виріб.

Гарантія задоволеності ALPS

ALPS пропонує політику безпроблемного повернення протягом 14 днів з дати покупки.

Термін придатності

Термін придатності: 20 років при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

Умови зберігання. Зберігати в сухому прохолодному місці, захищеному від світла, вологи, тепла, кисню, озону та будь-яких хімічних речовин. Оптимальна температура зберігання - нижче 100°F (38°C).




Очікуваний термін використання. 3 місяці, залежно від рівня активності користувача. Припиніть використання у разі появи ознак зносу або погіршення якості.

Гарантія

ALPS Padsils має гарантію на виробничі дефекти протягом 6 місяців з дати покупки. ALPS гарантує лише те, що її продукція буде відповідати її специфікаціям. **НЕ ІСНУЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ.** Винятковим засобом правового захисту користувача та виключною відповідальністю компанією ALPS є заміна будь-якого продукту, який не відповідає гарантійним зобов'язанням. Компанія ALPS не несе відповідальності за випадкові або непрямі збитки будь-якого виду.

Щоб отримати номер дозволу на повернення Alps (RA#), зателефонуйте до служби підтримки клієнтів ALPS та надайте представнику ALPS наступну інформацію:

1. Ідентифікаційний номер клієнта
2. Номер рахунку-фактури
3. Дата інвойсу
4. Характер повернення

Символи/Легенда	
Медичні вироби	
Багаторазове використання для одного пацієнта	
Виробник	

Відповідність вимогам CE

Цей виріб відповідає вимогам Європейського регламенту EU2017/745 щодо медичних виробів. Цей виріб класифіковано як виріб класу I відповідно до правил класифікації, викладених у Додатку VIII до регламенту.

Відповідність вимогам України

Цей виріб відповідає вимогам Технічного регламенту 753 щодо медичних виробів. Цей виріб класифіковано як виріб класу I відповідно до правил класифікації, викладених у Додатку II до регламенту.

Повідомлення про серйозні інциденти

У малоймовірному випадку серйозного інциденту, пов'язаного з цим пристроєм, слід повідомити про нього виробника/ уповноваженого представника та національний компетентний орган.

ТОВ «АЛЬПС САУЗ ЮКРЕЙН» 01033, Україна, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, офіс 14 Тел +38 (067) 889 80 28 Тел +38 (095) 284 25 38 alpsukraine@easyliner.eu www.alpsukraine.com	 CEpartner4U Esdoomlaan 13 3951DB Maarn The Netherlands www.cepartner4u.com	 ALPS South LLC 2895 42nd Ave. N. St. Petersburg, FL. 33714 USA Tel: 1-727-528-8566 Fax: 1-727-528-8862 Info@easyliner.com www.easyliner.com
---	--	--