



VSDT– Liberty® Liner II

Інструкція з використання



Захищений наступними патентами
7,709,570 B2

ALPS Liberty Liner II має вбудований клапан, розташований дистально, для видалення повітря. Односторонній клапан для виведення повітря знаходиться в зубчастому штифті для штифтового і замкового кріплення, а також в адаптері для вакуумного кріплення. М'який на дотик гель зменшує ймовірність виникнення висипань та пошкоджень на шкірі біля проксимального краю лайнера та в чутливих кісткових ділянках.

Беззамковий лайнер: Необхідно окремо придбати редуктор Liberty Liner II з вбудованим клапаном (LDA-764)

Замковий лайнер: Необхідно придбати штифт Liberty Liner II з вбудованим клапаном окремо (LDP-764 або LDPU-864)

РОЗМІР

Виміряйте окружність кукси на відстані 6 см від верхівки кукси.
Виберіть розмір, менший за виміряну окружність.

Приклад 1:	Виміряна окружність	24
	Оберіть розмір	24
Приклад 2:	Виміряна окружність	27
	Оберіть розмір	26

Вимірний розмір (см)	бмм
20 - 23 см	VSDT 20-6
24 - 25 см	VSDT 24-6
26 - 27см	VSDT 26-6
28 - 31 см	VSDT 28-6
32 - 37 см	VSDT 32-6
38 - 43 см	VSDT 38-6

Як одягати лайнер Liberty Liner II:

Хоча немає необхідності наносити будь-який тип лубриканта на куксу, ви можете використовувати дуже невелику кількість силіконового лосьйону для шкіри ALPS SL108. **Уникайте вазелін та інші засоби на масляній основі**, оскільки вони можуть пошкодити лайнер Liberty Liner. **Тальк утворює на поверхні Liberty Liner наліт.** (Використання SL108 є кращою альтернативою).

Ви можете одягати Liberty Liner II, як перевернувши і згорнувши його, так і одягнувши як шкарпетку. Будь-яке повітря, що потрапило між куксою та лайнером, буде випущено протягом перших кількох кроків.

Зберігання лайнера Liberty:

Завжди зберігайте пінопластовий вкладиш у Liberty Liner II, коли він не використовується. Тривале лежання в горизонтальному положенні може призвести до утворення складок.

Очищення лайнера Liberty Liner

Щодня: Вимийте лайнер і куксу теплою водою з нейтральним милом, наприклад, Очишувач ALPS PD595 або іншим гіпоалергенним милом зі збалансованим рН. Використовуйте мочалку, щоб протерти лайнер, але не тріть і не скребіть, інакше ви пошкодите лайнер. Добре промийте. Витріть лайнер насухо чистим сухим рушником.

Щотижня: Нанесіть невелику кількість медичного спирту на м'яку чисту тканину. Ретельно протріть лайнер тканиною і витріть насухо рушником НЕ замочуйте лайнер в спирті.

Зрідка: Якщо тканина сильно забруднена, виперіть її в пральній машині, використовуючи холодний цикл і миючий засіб для тканин, використовуючи цикл додаткового полоскання; потім висушіть в сушильній машині, використовуючи цикл «пух».

Символ Легенда	
Лайнер 	Медичний виріб 
Наколінник 	Багаторазове використання одним пацієнтом 
	Виробник 

Найпоширеніші запитання

Питання: Мій пацієнт після першого використання Liberty Liner II поскаржився на підвищене потовиділення. Чи є це нормальним явищем?

Відповідь: Надмірне потовиділення - це нормально. Воно поступово зменшиться протягом двох-шести тижнів. Ви можете користуватися антиперспірантом, але якщо з'явиться висип, припиніть його використання.

Питання: Чи потрібно обрізати Liberty Liner II над коліном або трохи вище краю гільзи, або ж слід відобразити Liberty Liner II над гільзою, щоб забезпечити фіксацію?

Відповідь: Ви можете зробити все перераховане вище. Ми рекомендуємо обрізати на 1 дюйм вище краю гільзи. Для обрізки можна використовувати ножиці, ролик для піци або гарячий ніж для пластику (McMaster Carr's Part #2453A61). Якщо ви вирішили наклеїти Liberty Liner II на гільзу, переконайтеся, що край куксоприймача добре заклеєний скотчем, інакше ви виріжете отвір у лайнері. (У такому випадку гарантія не поширюється).

Питання: Liberty Liner II дуже легко забруднюється. Чи впливає це на його продуктивність?

Відповідь: Ні, це не впливає на продуктивність. Це правда, що Liberty Liner легко вбирає плями. Якщо пляму не вдається видалити за допомогою описаних вище процедур, рекомендується накрити відкриту частину підкладки шматком тканини від 14 «до 16» або високоефективним тканинним чохлам, який можна придбати у компанії ALPS.

Питання: У мене з'явилися мікротріщини на поверхні.

Відповідь: Мікротріщини можуть з'явитися, коли

а) використовуються нафтопродукти або органічні олії, які тривалий час контактують з лайнером. Шкіра деяких пацієнтів може бути достатньо жирною, щоб викликати мікротріщини. У таких випадках термін служби лайнера значно зменшується. Протезист вирішить, чи підходить лайнер таким пацієнтам.

б) Лайнер розтягнутий на 100% від початкового розміру і утримується в розтягнутому положенні.

Питання: Як запобігти викручуванню штифта з дистального кінця замкового лайнера?

Відповідь: Використовуйте фіксатор різьби типу Loctite 242 або його аналог.

Гарантія

14-денна гарантія задоволення, без запитань

24 місяці гарантії на виробничі дефекти, якщо пара видається ампутованій людині

12 місяців гарантії на виробничі дефекти, якщо ампутованому видається **однин** лайнер

Щоб отримати номер дозволу на повернення ALPS (RA#) для гарантійного обслуговування, зателефонуйте до служби підтримки клієнтів ALPS з 9:00 до 18:00 і надайте представнику ALPS наступну інформацію:

Ідентифікатор клієнта № - Інвойс № - Дата інвойсу – Характер повернення

Попередження: Винятками з цієї гарантії є: порізи, дірки, будь-які розриви внаслідок ударів, подряпин тощо.

Термін придатності

3-5 років при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

Умови зберігання. Зберігати в сухому прохолодному місці, захищеному від світла, вологи, тепла, кисню, озону та будь-яких хімічних речовин. Оптимальна температура зберігання - нижче 100°F (38°C).

Очікуваний термін використання.

12 місяців, залежно від рівня активності користувача. Припиніть використання у разі появи ознак зносу або погіршення якості.

<p>ТОВ «АЛЬПС САУЗ ЮКРЕЙН» 01033, Україна, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, офіс 14 Тел +38 (067) 889 80 28 Тел +38 (095) 284 25 38 alpsukraine@easyliner.eu www.alpsukraine.com</p>	<p> CEpartner4U Esdoornlaan 13 3951DB Maarn The Netherlands www.cepartner4u.com</p>	<p> ALPS South LLC 2895 42nd Ave. N. St. Petersburg, FL. 33714 USA Tel: 1-727-528-8566 Fax: 1-727-528-8862 Info@easyliner.com www.easyliner.com</p>
--	--	---