



**EasySkin<sup>®</sup>**  

**Косметичне покриття  
Інструкція з використання**



Патент США 6,911,049

## Потрібні матеріали

Косметичне покриття ALPS - артикул # TSK-(колір)-(розмір)

Промисловий фен

Лосьйон для шкіри - артикул # SL108

## Порядок дій

1. Вийміть попередньо розтягнуте косметичне покриття EasySkin з тубика.
2. Нанесіть лосьйон для шкіри (SL108) на протезовану п'яту перед тим, як накладати EasySkin на протез. **НЕ** витягуйте все покриття EasySkin на стопі та в ділянці ахіллового суглоба. Це може призвести до розриву безпосередньо біля п'яткової кістки. Феном видалить надлишки матеріалу, починаючи з пальців, до середини стопи, п'яткової кістки, ахіллової кістки, і продовжуючи працювати далі.
3. Використовуючи Фен, нагрівайте до тих пір, поки покриття не буде щільно прилягати до ділянок, де EasySkin повинен зменшитися в об'ємі. Переконайтеся, що фен не працює на одній ділянці протягом тривалого періоду часу. Температура термофену повинна бути в межах 400-700F.
4. Приклейте покриття до гільзи промисловим вініловим клеєм і обріжте проксимальний край. За бажанням, за допомогою гарячої праски нагрійте і розгладьте проксимальний край EasySkin.

## Процедура визначення розміру пальців стопи



1. Вийміть попередньо розтягнуте косметичне покриття EasySkin з тубика.
2. Нанесіть лосьйон для шкіри (SL108) на протезовану п'яту перед тим, як накладати EasySkin на протез. **НЕ** витягуйте все покриття EasySkin на стопі та в ділянці ахіллового

суглоба. Це може призвести до розриву безпосередньо біля п'яткової кістки. Феном видалить надлишки матеріалу, починаючи з пальців, до середини стопи, п'яткової кістки, ахіллової кістки, і продовжуючи працювати далі.

3. Використовуючи фен, нагрійте ділянку стопи на EasySkin до тих пір, поки шкіра щільно не приляже до стопи. Температура теплового фену повинна бути в межах 400-700F, і не залишайте фен ізольованим на певній ділянці, щоб запобігти утворенню пухирів на покритті.

4. Залишивши решту шкіри попередньо розтягнутою від щиколотки до щиколотки, просуньте вакуумну трубку вниз до області щиколотки.

**Переконайтеся, що на кінці вакуумної трубки є тканина, щоб шкіра не блокувала джерело вакууму. Закрийте проміжок між вакуумною трубкою та Easyskin, проксимальніше лінії обрізки гільзи, щоб уникнути пошкодження шкіри. →**



5. Налаштуйте вакуумну помпу в діапазоні від 12 до 20 дюймів ртутного стовпчика, доки шкіра не буде щільно втягнута в області пальців ніг. Обов'язково використовуйте руку, щоб допомогти вакууму в щілинах і під нігтями пальців, а якщо в передній частині пальців виникають складки, видаліть надлишки матеріалу в напрямку до нижньої частини стопи.



6. Після того, як ви отримали повне визначення оболонки стопи за допомогою вакууму, залиште вакуум увімкненим і прогрійте область пальців ніг протягом 1-2 хвилин. Ви можете помітити легкий блиск шкіри на ділянці пальців ніг, де ви нагрівали. Якщо пальці ніг блищать, після охолодження стопи можна почистити їх тальком, щоб усунути блиск, а потім витерти надлишки тальку.

7. Тримайте оболонку стопи під вакуумом і дайте охолонути до кімнатної температури.



8. Висуньте вакуумну трубку назад між шкірою та пінопластом і завершіть притискання шкіри до пінопласту за допомогою тепла.
9. Приклейте покриття до гільзи промисловим вініловим клеєм і обріжте проксимальний край.



### Таблиця розмірів TSK

Таблиця розмірів (дюйми)

Таблиця розмірів (сантиметри)

		<u>Довжина</u>			<u>Довжина</u>			
		<u>стопи</u>	<u>Щиколотка</u>	<u>Литка</u>	<u>стопи</u>	<u>Щиколотка</u>	<u>Литка</u>	
Малий	Мін	7.1	6.7	9.9	Мін	18	17	25
	Мак	9.1	8.7	13.8	Макс	23	22	35
Великий	Мін	9.1	8.7	13.8	Мін	23	22	35
	Мак	11.8	11.4	17.7	Макс	30	29	45

- Будь-який тип вінілового клею підійде для приклеювання косметичної оболонки. Рекомендований ALPS клей, який був протестований, - це HH-66, який можна придбати у McMaster Carr.
- Використання лосьйону для шкіри (SL108) при виготовленні допоможе запобігти

розриву шкіри. Спосіб застосування: Нанесіть SL108 на область п'яти протеза перед тим, як натягувати шкіру на термоформу.

### **Очищення TSK**

Використовуючи мочалку з теплою водою, протріть поверхню, але не тріть і не скребіть, інакше ви можете пошкодити виріб.

### **Термін придатності**

3-5 років при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

Умови зберігання. Зберігати в сухому прохолодному місці, захищеному від світла, вологи, тепла, кисню, озону та будь-яких хімічних речовин. Оптимальна температура зберігання - нижче 100°F (38°C).

### **Очікуваний термін використання.**

12 місяців, залежно від рівня активності користувача. Припиніть використання у разі появи ознак зносу або погіршення якості.

### **Гарантія задоволеності від ALPS**

ALPS пропонує політику безпроблемного повернення протягом 14 днів з дати покупки. Якщо ви не на 100% задоволені TSK EasySkin, зателефонуйте до служби підтримки клієнтів ALPS, щоб отримати номер дозволу на повернення та повернути покупку (за винятком транспортних витрат).

**Гарантія:** На ALPS TSK EasySkin надається гарантія на виробничі дефекти протягом 6 місяців з дати придбання.

Щоб отримати номер дозволу на повернення ALPS (RA#) для гарантійного обслуговування, зателефонуйте до служби підтримки клієнтів ALPS з 9:00 до 18:00 і надайте представнику ALPS наступну інформацію:

**Ідентифікатор клієнта № - Інвойс № - Дата інвойсу – Характер повернення**

**Попередження:** Винятками з цієї гарантії є: порізи, дірки, будь-які розриви внаслідок ударів, подряпин тощо

<p><b>ТОВ «АЛЬПС САУЗ ЮКРЕЙН»</b> 01033, Україна, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, офіс 14 Тел +38 (067) 889 80 28 Тел +38 (095) 284 25 38 alpsukraine@easyliner.eu www.alpsukraine.com</p>	<p> <b>CEpartner4U</b> Esdoornlaan 13 3951DB Maarn The Netherlands <a href="http://www.cepartner4u.com">www.cepartner4u.com</a></p>	<p> <b>ALPS South LLC</b> 2895 42nd Ave. N. St. Petersburg, FL. 33714 USA Tel: 1-727-528-8566 Fax: 1-727-528-8862 Info@easyliner.com www.easyliner.com</p>
--	--	---

5647 02855.7U7A  
Січень 2023