



# ENCIP -Skin Reliever

Гелева оболонка/чохол



Патент США 7,709,570

**ALPS Skin Reliever** - це, гелева оболонка, що використовується для компенсації втрати об'єму кукси. Skin Reliever виготовлений з гелю ALPS EasyGel, з 3 мм гелю на дистальному кінці для забезпечення комфорту, що звужується до 1,5 мм гелю на проксимальних сторонах для компенсації зменшення об'єму. Skin Relievers доступний у трьох розмірах, оскільки гель EasyGel має 2000% еластичності, ці три розміри підійдуть усім пацієнтам. Дивіться таблицю розмірів нижче.

### **Таблиця розмірів**

Вимірювання проведено на відстані 6 см від дистального кінця

<b>Вимірний розмір</b>	<b>Код #</b>
10-19 см	ENCP-16
20 -27см	ENCP-20
28-37см	ENCP-28

### **Одягаємо Skin Reliever**

Хоча немає необхідності наносити будь-який тип лубрикантів на куксу, ви можете використовувати тальк або дуже невелику кількість силіконового лосьйону для шкіри Alps SL108. **Уникайте вазелін та інші засоби на масляній основі**, оскільки вони можуть пошкодити гель. **Тальк утворює на поверхні Skin Reliever наліт.** (Використання SL108 є кращою альтернативою).

Ви можете одягати Skin Reliever, перевернувши і згорнувши його або одягнувши як шкарпетку.

Видаліть будь-які повітряні кишені, що потрапили між куксою та чохлом.

### **Зберігання Skin Reliever**

Завжди тримайте пінопластову вставку в Skin Reliever, коли він не використовується. Тривале лежання в горизонтальному положенні може призвести до утворення складок.

### **Очищення Skin Reliever**

**Щодня:** Мийте Skin Reliever і куксу теплою водою з нейтральним милом, наприклад, Очищувач ALPS PD595 або будь-яким іншим гіпоалергенним милом з рН. Використовуйте мочалку, але не тріть і не скребіть, інакше ви пошкодите Skin Reliever. Добре промийте. Витріть Skin Reliever насухо чистим сухим рушником.

**Щотижня:** Нанесіть невелику кількість медичного спирту на м'яку чисту тканину. Ретельно протріть Skin Reliever серветкою, витріть насухо рушником і злегка присипте тальком зовнішню поверхню лайнера. **НЕ** занурюйте лайнер в спирт.

### **Термін придатності**

3-5 років при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

Умови зберігання. Зберігати в сухому прохолодному місці, захищеному від світла, вологи, тепла, кисню, озону та будь-яких хімічних речовин. Оптимальна температура зберігання - нижче 100°F (38°C).

Очікуваний термін використання: 30 днів залежно від рівня активності користувача. Припиніть використання у разі появи ознак зносу або погіршення якості.

## **ГАРАНТІЯ**

14-денна гарантія задоволення без запитань

## 30-денна гарантія на виробничі дефекти

Щоб отримати номер дозволу на повернення ALPS (RA#) для гарантійного обслуговування, зателефонуйте до служби підтримки клієнтів ALPS:00 і надайте представнику ALPS наступну інформацію:

**Ідентифікатор клієнта № - Інвойс № - Дата інвойсу –  
Характер повернення**

**Попередження:** Винятками з цієї гарантії є: порізи, дірки, будь-які розриви внаслідок ударів, подряпин тощо

<p><b>ТОВ «АЛЬПС САУЗ ЮКРЕЙН»</b> 01033, Україна, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, офіс 14 Тел +38 (067) 889 80 28 Тел +38 (095) 284 25 38 alpsukraine@easyliner.eu www.alpsukraine.com</p>	<p> <b>CEpartner4U</b> Esdoornlaan 13 3951DB Maarn The Netherlands <a href="http://www.cepartner4u.com">www.cepartner4u.com</a></p>	<p> <b>ALPS South LLC</b> 2895 42nd Ave. N. St. Petersburg, FL. 33714 USA Tel: 1-727-528-8566 Fax: 1-727-528-8862 Info@easyliner.com www.easyliner.com</p>
--	--	--

5640 02848.7U7 A  
Липень 2024