

PRO-FIT LINER

PFGFR | PFGDT

Забезпечує ідеальне прилягання.



ОПИС

ALPS® Pro-Fit - це протезний лайнер, виготовлений з OptiGel, який забезпечує чудову адаптацію до кукси. У той же час, нове та вдосконалене кріплення дистального кінця дозволяє користувачеві відчувати високу надійність фіксації, що призводить до покращеного контролю, комфорту та безпеки.

Рекомендований рівень активності: K2-K4



ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ


ПРЕМІАЛЬНА СІРА ТКАНИНА

OPTIGEL

ЗАМКОВИЙ & БЕЗЗАМКОВИЙ


- ✓ Виготовлений з гелю OptiGel, який має більш гладку і м'яку текстуру, ніж інші лайнери, що забезпечує дбайливий контакт зі шкірою і щільне прилягання до кукси.
- ✓ Має нову низькопрофільну алюмінієву парасольку, що забезпечує покращену взаємодію між лайнером та кінцівкою, а також додаткову гнучкість дистальної частини для максимального комфорту.
- ✓ Доступні у двох рівномірних товщинах, 3 мм або 6 мм, обидві з яких мають потовщений гель у дистальній частині для покращення амортизації та комфорту.
- ✓ Довготривале використання завдяки гладенькій сірій зовнішній тканині, яка обмежує зсув через низьку вертикальну еластичність.

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО РОЗРІЗУ

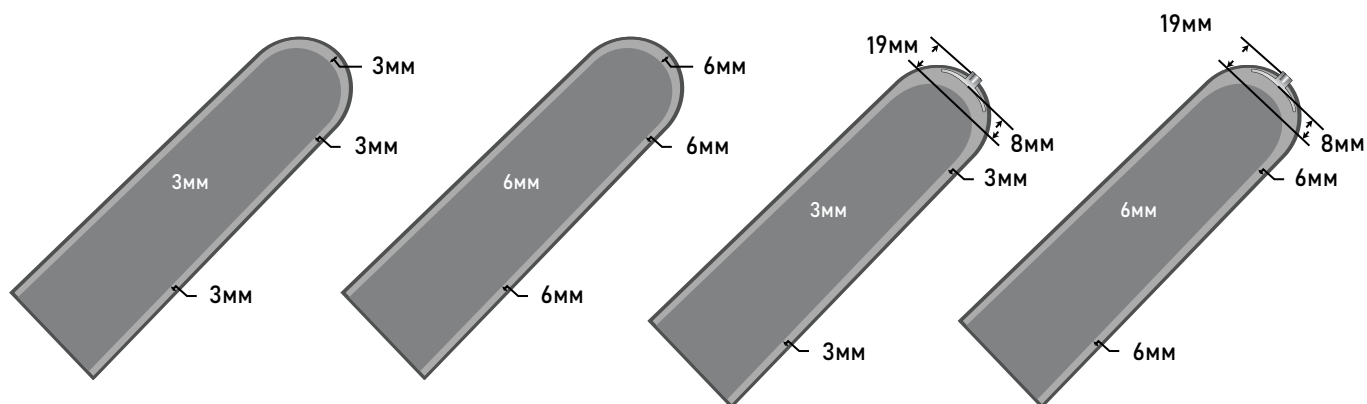

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІРІ

Виміряйте окружність кукси на 6 см вище дистального кінця

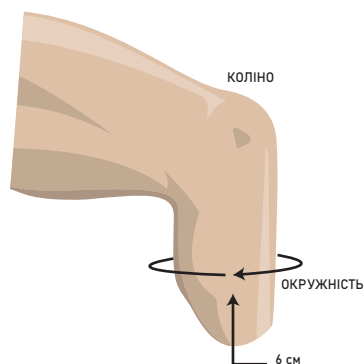

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

ВИМІРЯНИЙ РОЗМІР (СМ)	ЗАМКОВИЙ 3ММ ЧИ 6ММ РІВНОМІРНО	БЕЗЗАМКОВИЙ 3ММ ЧИ 6ММ РІВНОМІРНО
16-19 см	PFGDT20-(3 чи 6)	PFGFR20-(3 чи 6)
20-23 см	PFGDT20-(3 чи 6)	PFGFR20-(3 чи 6)
24-25 см	PFGDT24-(3 чи 6)	PFGFR24-(3 чи 6)
26-27 см	PFGDT26-(3 чи 6)	PFGFR26-(3 чи 6)
28-31 см	PFGDT28-(3 чи 6)	PFGFR28-(3 чи 6)
32-34 см	PFGDT32-(3 чи 6)	PFGFR32-(3 чи 6)
35-37 см	PFGDT35-(3 чи 6)	PFGFR35-(3 чи 6)
38-43 см	PFGDT38-(3 чи 6)	PFGFR38-(3 чи 6)
44-53 см	PFGDT44-(3 чи 6)	PFGFR44-(3 чи 6)