

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИРОБУ

UA



ПРОТЕЗНІ ЧОХЛИ ALPS KCN, KCM, KCW



Протезні чохли ALPS легкі та м'які, забезпечують амортизацію та комфорт для чудового прилягання. Чохли виготовлені з використанням волокон Coolmax для створення системи управління вологою, яка відводить піт від тіла і пропускає його крізь тканину, де він може швидко випаровуватися.

Чохли пристосовані до коливань об'єму і їх можна носити як з протезом, так і без нього.

Кольорове маркування для ідентифікації товщини:

1-шаровий: Синій

3-шаровий: Жовтий

5-шаровий: Зелений

Призначення

Виріб призначений для використання як частина протеза нижньої кінцівки.

В основному використовується поверх протезного лайнера для компенсації коливань об'єму кукси; він також забезпечує додатковий захист і амортизацію шкіри та допомагає зменшити тертя між протезом і куксою.

Інструкції щодо носіння та догляду

- Щодня одягайте чисті шкарпетки
- Прати правую стороною назовні
- Машинне прання в теплій воді з м'яким миючим засобом



- Використовуйте тільки відбілювач без хлору
- Сушити у пральній машині - делікатний режим, середній рівень нагрівання



Застереження



Не носити на пошкодженій або травмованій шкірі

Припиніть використання, якщо на виробі з'явилися дірки або інші ознаки погіршення стану


Гарантійна політика

3-денна гарантія повернення товару

Шкарпетки мають гарантію від виробничих дефектів

Як визначити розмір?

1. Виміряйте довжину від дистального кінця кукси до верхньої частини гільзи протеза. Довжина протезного чохла повинна бути приблизно на 5 см більшою за цей вимір.
2. Виміряйте "дистальну окружність" на 5 см вище від нижньої частини дистального кінця.
3. Використовуйте наведену нижче таблицю, щоб підібрати відповідний розмір протезного чохла ALPS.

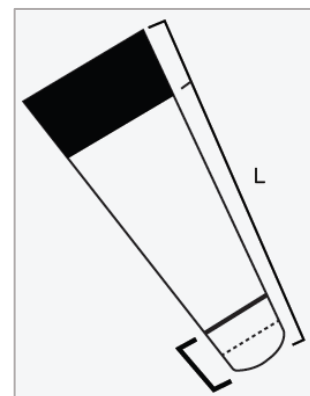

Таблиця розмірів

РОЗМІР	Виміряна дистальна окружність	Довжина куксоприймача (мін. - макс.)	Опис чохлів	Код
08	20-23 cm	13-18 cm	Вузький Надзвичайно Короткий	KCN-08-(ply)(N/H/HR)
10	20-23 cm	18-23 cm	Вузький Короткий	KCN-10-(ply)(N/H/HR)
14	20-23 cm	23-38 cm	Вузький Звичайний	KCN-14-(ply)(N/H/HR)
18	20-23 cm	38-48 cm	Вузький Довгий	KCN-18-(ply)(N/H/HR)
08	23-31 cm	13-18 cm	Середній Надзвичайно Короткий	KCM-08-(ply)(N/H/HR)
10	23-31 cm	18-23 cm	Середній Короткий	KCM-10-(ply)(N/H/HR)
14	23-31 cm	23-38 cm	Середній Звичайний	KCM-14-(ply)(N/H/HR)
18	23-31 cm	38-48 cm	Середній Довгий	KCM-18-(ply)(N/H/HR)
08	31-36 cm	13-18 cm	Широкий Надзвичайно Короткий	KCW-08-(ply)(N/H/HR)
10	31-36 cm	18-23 cm	Широкий Короткий	KCW-10-(ply)(N/H/HR)
14	31-36 cm	23-38 cm	Широкий Звичайний	KCW-14-(ply)(N/H/HR)
18	31-36 cm	38-48 cm	Широкий Довгий	KCW-18-(ply)(N/H/HR)

Символ/Легенда



Багаторазове використання для одного пацієнта

Утилізація

Виріб та упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих або національних екологічних норм.

Будь ласка, перевірте місцеві та національні екологічні норми та утилізуйте відповідно до них.



Відповідність CE

Цей виріб відповідає вимогам Європейського регламенту EU2017/745 щодо медичних виробів. Цей виріб класифіковано як пристрій класу I відповідно до правил класифікації, викладених у Додатку VIII до регламенту.



Інформування про серйозні інциденти

У малоймовірному випадку серйозного інциденту, пов'язаного з цим виробом, слід повідомити про нього виробника та національний компетентний орган..



ТОВ «АЛЬПС САУЗ ЮКРЕЙН»

01033, Україна, м.Київ,
вул. Сім'ї Прахових,
58/10

Тел +38 (067) 889 80 28

Тел +38 (095) 284 25 38

alpsukraine@easyliner.eu

www.alpsukraine.com



CEpartner4U

Esdoornlaan 13,
3951DB Maarn,
The Netherlands

www.cepartner4u.com