

ULTRASEAL GEL LINER

На ступеньку выше.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



ОПИСАНИЕ

Представляем вам инновационный гелевый лайнер UltraSeal - продукт, который безупречно сочетает в себе передовые Sealing технологии с максимальными преимуществами геля.

Благодаря интегрированной ленте, доступной в трех вариантах высоты, пользователи получают герметичное уплотнение при входе в куксоприемник. В сочетании с OptiGel этот лайнер обеспечивает исключительный комфорт и отличное прилегание к культи, гарантируя надежное и прочное прилегание, что повышает контроль, комфорт и безопасность.

КОД#

КЛЕПЛЕНИЕ

USHGL/USLGL/USUGL

ЗАМКОВЫЙ

USHGC/USLGC/USUGC

БЕЗЗАМКОВЫЙ

Рекомендован для всех уровней активности



ПОЧЕМУ ULTRA GEL?

1

Это единственный герметичный лайнер, доступный в форме геля.

OptiGel имеет гладкую, мягкую текстуру, которая обеспечивает мягкий контакт с кожей и индивидуальное прилегание к культи.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ

2

Изготовлен из менее плотной ткани.

Внешняя ткань Premium сочетает в себе прочность, долговечность и равномерную эластичность, что обеспечивает комфорт.

ЛЕГКО ОДЕВАЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ

3


Доступен в двух вариантах: замковый и беззамковый

Замковая версия гарантирует, что пользователи получают надежное, прочное и комфортное крепление.

ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

1 ТОЛЩИНА | 3 ВАРИАНТА ВЫСОТЫ КОЛЕЦ | БЕЗЗАМКОВЫЙ & ЗАМКОВЫЙ

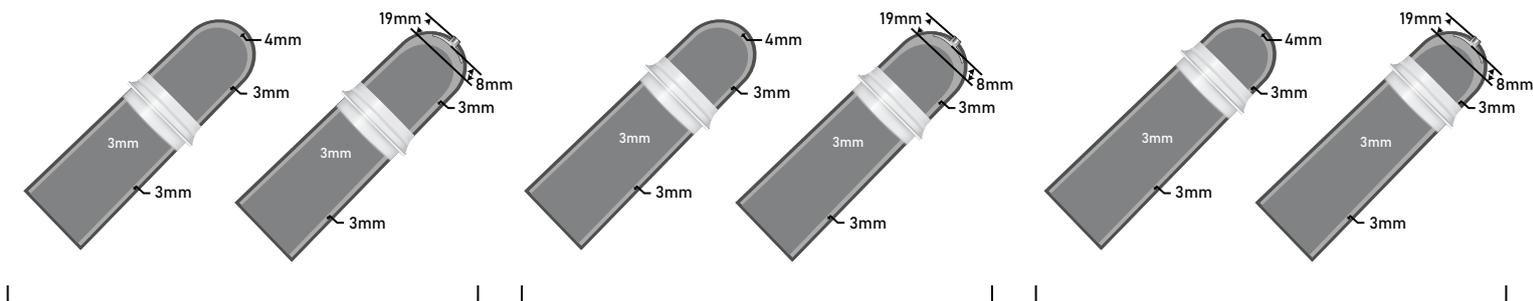

Высокое кольцо начинается на расстоянии 18 см от центра дистального конца

Низкое кольцо начинается на расстоянии 13 см от центра дистального конца.

Сверхнизкое кольцо начинается на расстоянии 8 см от центра дистального конца.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность культы на 6 см выше дистального конца

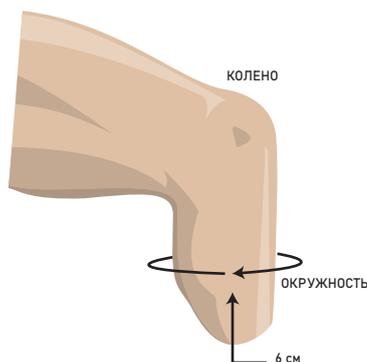


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (СМ)	У	У	У	У	У	У
	ВЫСОКОЕ КОЛЬЦО ЗАМКОВЫЙ	ВЫСОКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАМКОВЫЙ	НИЗКОЕ КОЛЬЦО ЗАМКОВЫЙ	НИЗКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАМКОВЫЙ	СВЕРХНИЗКОЕ КОЛЬЦО ЗАМКОВЫЙ	СВЕРХНИЗКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАМКОВЫЙ
	3ММ РАВНОМЕРНО	3ММ РАВНОМЕРНО	3ММ РАВНОМЕРНО	3ММ РАВНОМЕРНО	3ММ РАВНОМЕРНО	3ММ РАВНОМЕРНО
20-23 см	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 см	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 см	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 см	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 см	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 см	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 см	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 см	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3